

Μαντηλάκια απολύμανσης χωρίς αλκοόλ Bechtofix. Μέγεθος από τα μαντηλάκια: 14 x 20 cm. **Περιοχή εφαρμογής σύμφωνα με την οδηγία ιατρικών προϊόντων:** Προκατασκευασμένα μαντηλάκια για απολύμανση και καθαρισμό ιατρικών συσκευών ευαίσθητων στο αλκοόλ, π.χ. φυσικό και συνθετικό δέρμα ιατρικών καρεκλών.

Περιοχή εφαρμογής σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα:

Προκατασκευασμένα μαντηλάκια για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών ευαίσθητων στο αλκοόλ. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Εφαρμογή: Πάρτε ένα μόνο μαντηλάκι από τη μέση του ρολού και σκουπίστε την επιφάνεια καλά. Τηρείτε τον χρόνο έκθεσης. Στη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό και καθαρό πανί. Κλείστε το κουτί αμέσως μόλις τραβήξετε ένα μαντηλάκι.

Δραστικά συστατικά: 100 g του διαλύματος περιέχουν: 250 mg βενζυλο-C12-16-αλκυλοδιμεθυλο-χλωρίδια, 250 mg χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο, 250 mg C12-14 αλκυλο[(αιθυλοφαινυλο)μεθυλο] διμεθυλο-χλωρίδια.

Ιδιότητες: Αποτελεσματικό κατά των βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του MRSA), ζυμομυκητών (EN 13727/13624) και αδρανοποιεί τους ιούς HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia (EN 14476) σε 1 λεπτό. Δοκιμάστηκε επιτυχώς στη δοκιμή 4 πεδίων σε 1 λεπτό (EN 16615).

Προφυλάξεις: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και προστασία ματιών/προσώπου. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.


Μην εισπνέετε τα σταγονίδια. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε το δροσερό. Προστατέψτε το από τον παγετό. Να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας (), για την αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού. Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς./ **(μη ανοιχτό):** δείτε επιτύπωση επαναπλήρωσης. **(επαναπλήρωση/ανοιχτό):** 28 ημέρες μετά το άνοιγμα.

Ημερομηνία έκδοσης: 04/2021.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



BAuA-Reg.-Nr: N-63861

 Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
www.becht-online.de

SK92A0421RS/EL