

Bechtozid sensitive

EL

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα

Σπρέι απολύμανσης και καθαρισμού επιφάνειας χωρίς QAC για ιατρικές συσκευές ανθεκτικές στο αλκοόλ. Ήπιο με τα υλικά. Υψηλή απόδοση.

Οικονομικό.

Ιδιότητες:

Το Bechtozid sensitive εξουδετερώνει βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA) ζυμομύκητες σε 1 λεπτό (EN 13727/13624) σύμφωνα με τις οδηγίες της DGHM/VAH (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) από 04/2015.

Εγγυάται την ενεργή προστασία κατά της φυματίωσης (*M. terrae*) σε 5 λεπτά (EN 14348). Δοκιμάστηκε επιτυχώς έναντι των ιών

HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia σε 1 λεπτό (EN 14476). Χωρίς αλδεϋδες και φαινόλες. Βιοαποικοδομήσιμο.

Εφαρμογή:

Για χρήση σε τις ιατροτεχνολογικές συσκευές, π.χ. σε χειρολαβές και σε επιφάνειες ανθεκτικές στο αλκοόλ. Ψεκάστε το Bechtozid sensitive στην επιφάνεια ή σε ένα καθαρό πανί μακριά από το σώμα και αποφύγετε την αναρρόφηση του νέφους. Βεβαιωθείτε, ότι η επιφάνεια καλύπτεται από μια πλήρη στρώση. Τηρείτε τον χρόνο έκθεσης.

Σφουγγίστε.

Δραστικά συστατικά:

100 g Bechtozid sensitive περιέχουν:

< 30 g αιθανόλη

Προφυλάξεις:

Αυτό είναι ένα ιατρικό προϊόν. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποφεύγετε να αναπνέετε τους ατμούς/εκνεφώματα. Φοράτε προστατευτικά

γάντια/προστατευτικά ρούχα/προστασία ματιών/προστασία προσώπου. ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος ή ο ερεθισμός των ματιών παραμένει:

Αναζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια. Σε περίπτωση πυρκαγιάς:

Χρησιμοποιήστε για την κατάσβεση ακτίνα νερού, CO₂, αφρό ανθεκτικό σε αλκοόλες, σκόνη πυρόσβεσης. Να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Να φυλάσσεται κλειδωμένο. Κρατήστε το δροσερό. Προστατέψτε το από το φως του ήλιου.

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας (), για την αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού. Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Προειδοποίηση

H226 Εύφλεκτο υγρό και εύφλεκτος ατμός
UN 1170 / Class 3 / PG III


ΠΑΡΤΙΔΑ

δείτε αποτύπωση

Ημερομηνία έκδοσης: 04/2021

UFI-Code: 0M00-Q0KV-300D-FQ7Y



 Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
www.becht-online.de

SK83A0421RS/EL